


Rychlý test na protilátky SARS-CoV-2 IgM/IgG

Rýchlotest na protilátky SARS-CoV-2 IgM/IgG


Specifikace / Špecifikácie:

Princíp testu:	Chromatografická imunoesej
Princíp testovania:	chromatografická imunoanalýza
Typ vzorku:	Kapilární krev odebraná ze špičky prstu (alternativně plná žilní krev, sérum nebo plazma)
Druh vzorky:	Kapilárna krv z bruška prsta (alternatívne celá krv zo žily, sérum alebo plazma)
Velikost vzorku / Objem vzorky:	10 μ l
Testovací doba / Dĺžka testovania:	15 minut / minút
Okolní teplota / Teplota okolia:	15-30°C
Skladovací teplota / Skladovacia teplota:	2-30°C
Velikost balení / Veľkosť balenia:	40 testů / 40 testov


Testovací procedura / Postup testovania

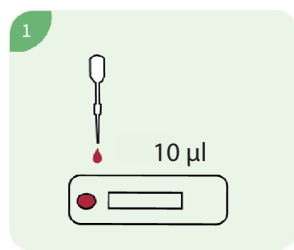

Aplikujte 10 μ l plné krve /
Naneste 10 μ l celej krvi






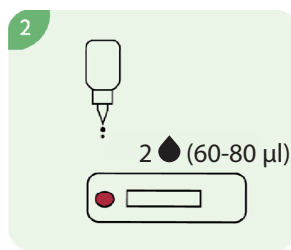


Aplikujte 2 kapky (60 - 80 μ l) pufru
/ Naneste 2 kvapky (60 - 80 μ l)
tlmiaceho roztoku

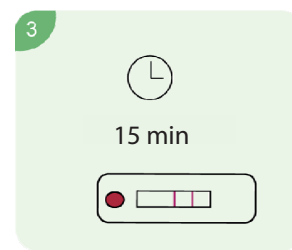

Po uplynutí 15 minut odečtěte výsledek testu.
Neodečítejte výsledek po uplynutí 20 minut.
/ Odčítajte výsledek po uplynutí 15 minút.
Neodčítavajte výsledek po 20 minútach.

Interpretace výsledku testu / interpretácia výsledku testu

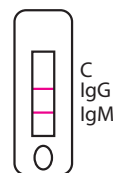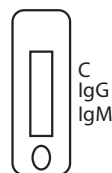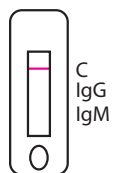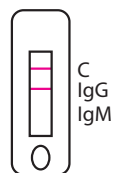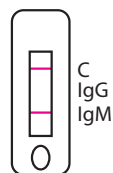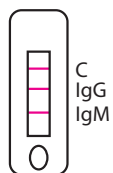

Pozitivní / Pozitívny

Negativní / Negatívny

Falešný / Neplatný

Klinická výkonnost / Klinická výkonnosť:

Clinical Performance of negative sample			
Negative Cases (By PCR&CT)	Negative coincidence rate (Wellion SARS-CoV-2 IgM)	Negative coincidence rate (Wellion SARS-CoV-2 IgG)	Negative coincidence rate (Total)
200	200 (100%)	200 (100%)	200 (100%)
Clinical Performance of positive sample (Symptoms appeared: 4-10 days)			
Positive Cases (By PCR&CT)	Positive coincidence rate (Wellion SARS-CoV-2 IgM)	Positive coincidence rate (Wellion SARS-CoV-2 IgG)	Positive coincidence rate (Total)
80	65 (81.3%)	30 (37.5%)	65 (81.3%)
Clinical Performance of positive sample (Symptoms appeared: 11-24 days)			
Positive Cases (By PCR&CT)	Positive coincidence rate (Wellion SARS-CoV-2 IgM)	Positive coincidence rate (Wellion SARS-CoV-2 IgG)	Positive coincidence rate (Total)
70	68 (97.1%)	67 (95.7%)	68 (97.1%)

	Obsah / Content	Číslo zboží / Art. No.
Rychlý test na protilátky SARS-CoV-2 IgM/IgG Rýchlotest na protilátky SARS-CoV-2 IgM/IgG	40 ks / 40 kusov	VID35-08-011