

Stručný návod na stažení naměřených hodnot glykémie z glukometru Wellion Newton GDH-FAD (BTE) do mobilní aplikace Glooko

1. Nastavte glukometr

Podle *Uživatelského manuálu* glukometru (součást balení glukometru) nastavte datum, čas a zapněte Bluetooth na glukometru. Poté použijte glukometr k měření glykémie.

2. Stáhněte aplikaci Glooko



Stáhněte aplikaci Glooko zdarma dostupnou v Obchod Play nebo Apple Store. Zaregistrujte se, povolte oznámení a zapněte na mobilním telefonu funkci Bluetooth.

3. Povolte Oprávnění aplikace



Na hlavní stránce aplikace vpravo nahoře klikněte na ikonu částečné postavy, pak na *Sdílení dat a ochrana osobních údajů* a povolte v *Oprávněních aplikace* minimálně sdílení *Polohy* a *Zařízení v blízkosti*.

4. Stáhněte hodnoty glykémie do aplikace Glooko

Zapněte stiskem tlačítka M glukometr. Na hlavní stránce aplikace klikněte na *Synchronizovat zařízení*, pak v případě prvního stahování klikněte na *Přidat nové zařízení* a vyhledejte v seznamu glukometrů glukometr Wellion Newton. Při opakovaném stahování není třeba přidávat nové zařízení. Klikněte po stisknutí *Synchronizovat zařízení* rovnou na symbol glukometru.

5. Zkontrolujte vaše stažené hodnoty glykémie

Vaše výsledky najdete po kliknutí na *Denní protokol* na hlavní stránce aplikace.

QR kódy a webové adresy pro stažení aplikace Glooko



Obchod Play (Android)
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glooko.logbook>



Apple Store (iOS)
<https://apps.apple.com/cz/app/glooko-track-diabetes-data/id471942748?l=cs>



Výrobek je diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro. Čtěte pečlivě návod k použití a seznámte se s možnými riziky spojenými s jeho používáním v souladu s určeným účelem.



ELEKTA, s.r.o.
V Braňce 262 • 252 17 Tachovice
Tel.: (+420) 277 015 011
e-mail: elekta@elekta.cz
www.elekta.cz • www.wellion.cz

Wellion_CZ wellion_cz

elekta s.r.o.
Elekta - a MED TRUST company